

ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ด้านที่ 5 ความปลอดภัย

5.9.3 มีการตรวจสอบ ทดสอบระบบสัญญาณเตือนของระบบก๊าซทางการแพทย์



การแจ้งเตือน			
สถานะ	เงื่อนไขแรงดัน	การแจ้งเตือน	การดำเนินการเบื้องต้น
HIGH	> 55 psi	ไฟสัญญาณ "HIGH" สีเหลืองติด / เสียงแจ้งเตือน	ตรวจสอบแหล่งจ่ายหลัก อาจมีแรงดันเกินจากระบบจ่าย
NORMAL	50-55 psi	ไฟ "NORMAL" สีเขียวติด	ระบบทำงานปกติ
LOW	< 50 psi	ไฟสัญญาณ "LOW" สีแดงติด / เสียงแจ้งเตือน	ตรวจสอบแรงดันรั่ว / ระบบจ่ายออกซิเจน อาจใกล้หมดหรือมีปัญหา
RESERVE IN USE	ใช้แหล่งจ่ายสำรอง	ไฟ RESERVE IN USE สีเหลืองติด	แจ้งวิศวกร/ช่างเพื่อสลับกลับมาใช้ระบบหลัก