



KSS1.2 สถานพยาบาลมีคู่มือขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นของระบบเรียกพยาบาล




ระบบการขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน



7.1.2 จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นของระบบเรียกพยาบาล เพื่อให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วยมีความเข้าใจในการใช้งานระบบเรียกพยาบาลที่ ตรงกัน รับรู้การใช้งานของระบบ สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี ลดข้อผิดพลาดที่อาจ เกิดขึ้นจากการสอนแบบปากเปล่า และลดภาระในการสอนงานให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่

วิธีเรียก ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่

1. เมื่อมีเสียงสัญญาณเตือนและไฟกระพริบขึ้นที่กล่องขอความช่วยเหลือ
2. ส่งเจ้าหน้าที่ไปจุดขอความช่วยเหลือ พร้อมกับกดปุ่มตอบรับสัญญาณที่กล่องควบคุม
3. เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงผู้ป่วย ประเมินอาการพบว่ามีอาการรุนแรงต้องการความช่วยเหลือให้แจ้ง code 131 ทันที
4. นำผู้ป่วยไปยังจุดดูแลผู้ป่วยแต่ละจุด
5. เมื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว เครื่องจะอยู่ใน mode พร้อมใช้งาน

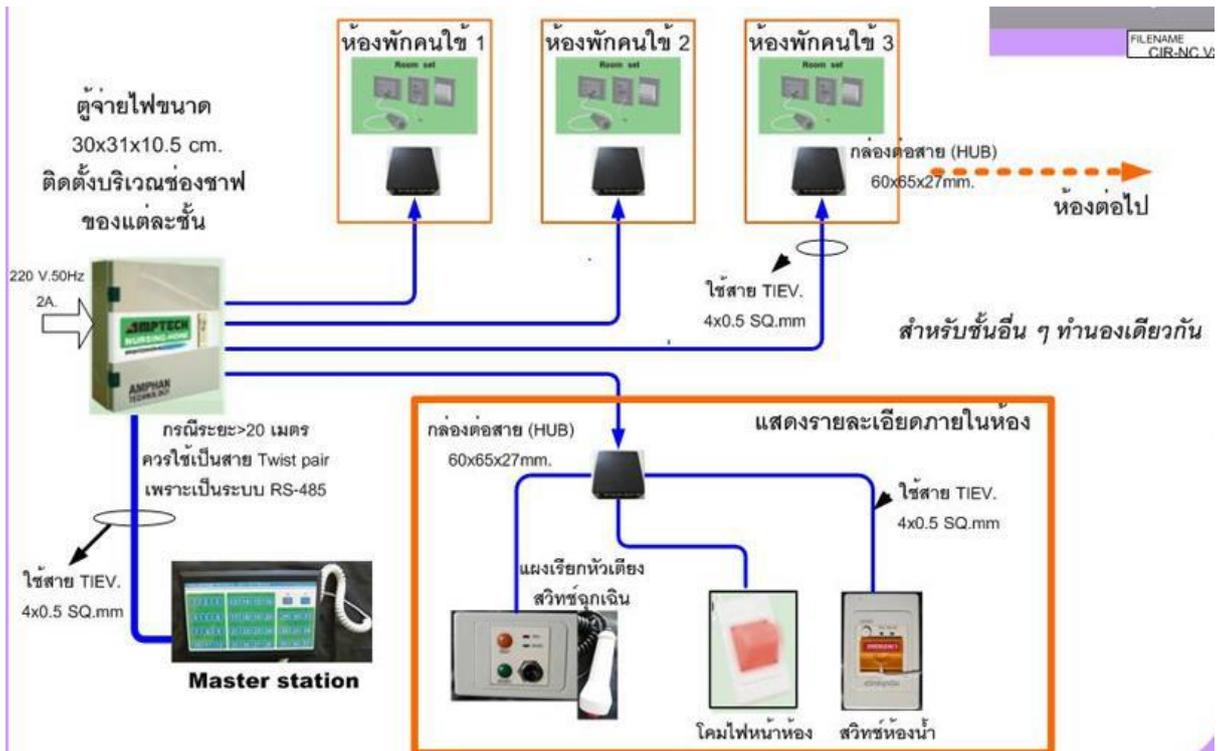

ผังระบบเรียกพยาบาล